



## Sélection des Cas

### Critères :

Simpli5 (5 gouttières par arcade) est un système d'alignement conçu pour aligner les incisives supérieures et inférieures.

Simpli5 peut aussi améliorer la position des canines. Notre équipe de soutien technique travaille avec vous dans la mesure du possible afin de satisfaire vos patients.

Simpli5 ne peut se substituer à un traitement orthodontique complet.

C'est pour cela qu'il est impératif de déterminer quels sont les patients qui peuvent bénéficier de ce type de soin.

Tout va dépendre de la façon dont vous comptez développer l'usage des systèmes d'alignement AOA à votre cabinet. On distingue principalement deux groupes de patients à traiter : les cas de récidence et les patients souffrant d'encombrements ou d'espacements légers à modérés des incisives. Ces derniers sont généralement les parents de vos jeunes patients. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un traitement orthodontique complet.

La majorité des patients traités pourra observer les résultats des soins sous 3 à 5 mois.

*“Le système Simpli5 de AOA offre une solution idéale pour les patients désireux de faire traiter une malocclusion légère avec un appareil esthétique offrant un bon rapport qualité-prix. Les résultats obtenus, la facilité de commande et les économies réalisées (en comparaison avec d'autres systèmes) nous ont convaincus de faire de Simpli5 un traitement phare de notre arsenal thérapeutique. Comme avec d'autres traitements du même type, il faut garder à l'esprit certaines restrictions et ne pas tenter l'impossible.*

- Bill Dischinger, DMD

## Arcades types



Vous pouvez envoyer des images digitalisées pour évaluation à [Simpli5@sybrondental.com](mailto:Simpli5@sybrondental.com). Les gouttières sont réalisées d'après empreintes en seulement 4 à 5 semaines.



## Faire face aux attentes du patient

### Faisabilité et Compromis :

Par expérience nous savons que les attentes des patients jouent un rôle crucial dans la réussite d'un traitement avec appareil amovible. Ce qui préoccupe le plus le patient est le résultat final.

Le système Simpli5 est conçu pour donner la meilleure correction aux incisives en un minimum de temps et au meilleur prix. Nous nous focalisons toujours sur le résultat des incisives (centrales et latérales).

Les canines jouent un rôle dans la correction globale, mais leur position est conservée telle qu'elle.


On ne peut envisager de sur-correction que lorsque la modification à effectuer se situe dans la limite de la capacité de mouvement du système.

Un appareil de finition sera sans doute nécessaire pour obtenir une sur-correction si le Simpli5 a été prescrit.

Les cales collées servent de point d'appui supplémentaire pour le déplacement des dents. Notons qu'elles augmentent la capacité de rétention des gouttières. Elles peuvent également être utiles si le patient présente une faible hauteur coronaire. Nous vous incitons à procéder au collage sur la dent avant la prise d'empreintes destinées à nos services Simpli5.

Notez que, moyennant un supplément, AOA propose un service “cales”. La forme d'une cale est spécialement fabriquée sur la dent sélectionnée.

On conçoit ensuite une gouttière qui comporte la niche adéquate. Il vous suffit de la remplir avec la colle puis de positionner la gouttière de transfert pour la polymérisation.

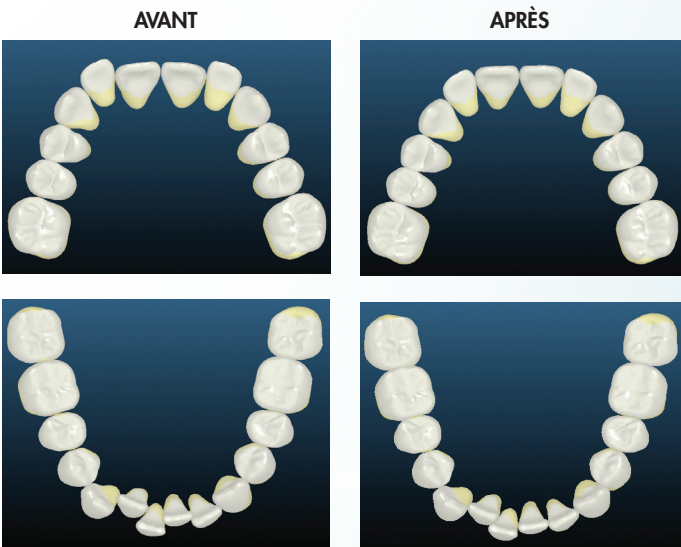

Il a été démontré qu'une correction agressive ne convient pas aux canines. AOA peut transiger sur la correction des canines afin d'optimiser les résultats dans leur ensemble. Le logiciel utilisé pour ces images n'appartient pas à AOA.



## Les clés du succès

### 5 étapes pour optimiser vos résultats :

1 Envoyez les empreintes en silicone prises avec précision et vérifiées par le praticien (AOA élaborera un modèle). Avec des empreintes en alginate, vous pouvez utiliser un plâtre de bonne qualité ou un modèle en dur et l'expédier. Même si vous traitez une seule arcade, il est recommandé de prendre les empreintes des arcades supérieure et inférieure.

2 Remplissez le formulaire AOA simply5 (Fig.1) et ajoutez vos commentaires sur l'objectif premier du traitement. Grâce à ces précisions, nos techniciens optimiseront les corrections primordiales que le traitement doit apporter. Le formulaire doit être envoyé avec les empreintes (ou le modèle) à la société Ormodont.

3 A réception du cas, lisez attentivement les notes qui vous seront renvoyées avec l'appareil. La fiche d'informations sur la réduction interproximale fournit des données importantes pour chaque gouttière. De même, si nous estimons qu'un stripping n'est pas utile, cela sera précisé.

4 Etablissez votre profil AOA. Ce laboratoire tient un registre informatisé des instructions de chaque client ce qui nous permet de modifier le formulaire Rx Simply5 de vos patients en cas de besoin. Ainsi AOA peut prendre en compte vos préférences thérapeutiques telles que : “la correction principale est l'alignement des incisives, la position des canines étant secondaire.” ou bien : “égalisez la gouttière supérieure à 1 mm au dessus de la ligne gingivale.”.

5 La brochure expédiée avec le cas est à étudier avec le patient. Incitez-le à signer la “Charte du Patient” et assurez-vous que celui-ci comprend ce qu'on attend de lui. Les appareils amovibles nécessitent la coopération du patient. Le succès du traitement se mesure à l'implication du patient dans le port de ses gouttières.

Figure 1

Figure 2

Figure 3





## Motiver vos patients

### Comment amorcer la conversation :

Pour communiquer efficacement sur le Simply5 auprès de vos patients, Ormodent met gratuitement à votre disposition des brochures d'informations. Ce document incite les patients à s'informer sur ce type de traitement. Bien entendu, le patient est assuré que vous, professionnel de l'orthodontie, déterminerez le traitement le plus adapté à ses besoins.

Le coût modéré de Simply5 vous permet d'adapter vos tarifs aux différentes situations. Vous pourrez opter pour un traitement Simply5 sur une ou deux arcades ; par exemple si le patient présente une récurrence à un traitement classique au niveau d'une arcade ou si les corrections nécessaires nécessitent l'appareillage des deux arcades.

Des typodonts de démonstration (fig. 2) sont disponibles pour les mâchoires supérieure et inférieure, montrant l'alignement "avant" et "après".

**Appelez dès aujourd'hui pour recevoir votre kit de démarrage rapide.**



Figure 1



Figure 2



[www.ormodent.com](http://www.ormodent.com)

Tél. : 00800 3032 3032 Fax: 00800 5000 4000  
Email : [CustomerService@ormcoeuropa.com](mailto:CustomerService@ormcoeuropa.com)  
[ormodent.com](http://ormodent.com)



## Guide de démarrage rapide

- Sélection des cas
- Gestion des cas
- Etude de cas
- Comment remplir le formulaire Simply5
- Comment motiver les patients

